



## SANISPIRA® deguna filtru lietošanas instrukcija

SANISPIRA® deguna filtri ir paredzēti lietošanai pieaugušajiem un personām no 12 gadu vecuma ar normālu un netraucētu elpošanu, ieskaitot tos, kuriem ir neliels muskuļu sasprindzinājums, kā arī velosipēdistiem un skrējējiem pilsētā.

SANISPIRA® ALLERGIA ir inovatīvs un diskrēts deguna filtrs, kas speciāli paredzēts, lai aizturētu smalkus un sevišķi smalkus putekļus (PM10µm - PM 2.5µm - PM 1µm), ziedputekšņus un citus alergēnus, kas var nonākt elpošanas ceļos.

SANISPIRA® ALLERGIA filtrē gaisu pirms jūs to ieelpojat. Praktisks, higiēnisks un estētiski (gandrīz) neredzams risinājums, kas ļauj elpot veselīgi.

Kā tas darbojas?

SANISPIRA® ALLERGIA deguna filtra funkcija ir attīrīt caur degunu ieelpoto gaisu, samazinot smalko putekļu, ziedputekšņu un citu alergēnu ieelpošanu. Tas ir gandrīz nemanāms un ļauj filtra lietotājam veikt dažādas aktivitātes, pat profesionālas, vienlaikus nodrošinot atbilstošu aizsardzību. Deguna filtra inovācija ir ļoti viskoza biogēla pārklājums filtra iekšienē pie kura pielīp un tiek aizturētas deguna gaisa plūsmā esošās putekļu daļiņas, ziedputekšņi un citi uztveršanai paredzētie alergēni, palīdzot samazināt un novērst alergiskas reakcijas un bojājumus elpošanas ceļos.

SANISPIRA® ALLERGIA deguna filtrs ir līdz 10 mm augsts un sver mazāk par vienu gramu. Deguna filtrs ir spirāles formas ar mērķi palielināt ieelpotā gaisa turbulenci, līdz ar to palielinot deguna gaisa plūsmā esošo putekļu daļiņu un alergēnu triecienu pret filtra iekšējām sienām, vienlaikus saglabājot minimālu elpošanas pretestību. Tas ir praktisks un viegli lietojams. Filtram ir divi gali, kur katrs no tiem atrodas savā nāsī un tie ir savienoti ar ārēju savienojošu sloksni, kas ļauj to pareizi un viegli ievietot nāsīs ar vienu rokas kustību, un, pateicoties ārējai savienošanai sloksnei arī viegli noņemt. Ierīces ārējā virsma ir saskarē ar deguna gļotādu un nodrošina filtra stabilitāti nāsīs, tajā pat laikā neradot spiedienu. Katrā iepakojumā ir desmit filtri higiēniskā iepakojumā un viena uzglabāšanai paredzēta kastīte. Nesatur lateksu.

SANISPIRA® deguna filtriem ir lieliska izmēru un formas pielāgošanās spēja nāsīs.

Izmēra piemeklēšanas rekomendācijas un ieteikumi ir orientējoši, jo ideālais izmērs var mainīties atkarībā no deguna uzbūves. SANISPIRA® deguna filtri ir pieejami trīs ērti pielāgojamās izmēros: S, M, L

L deguna ārējās ejas Ø minimāli 12mm - maksimāli 14mm, piemērots vīriešiem ar augumu virs 180 cm

M deguna ārējās ejas Ø minimāli 10.5mm - maksimāli 12,5mm, piemērots vīriešiem un sievietēm ar augumu 165 cm - 180 cm

S deguna ārējās ejas Ø minimāli 9mm - maksimāli 11mm, piemērots sievietēm un jauniešiem ar augumu <165cm

Kā tos pielietot?

Ievietojiet SANISPIRA® deguna filtrus nāsīs, neatdalot tos, pa vienam katrā nāsī tā, lai tie labi piekļautos deguna sienām un jūs normāli elpotu. Pareizi ievietotu SANISPIRA® deguna filtru var izmantot ne ilgāk kā 8 stundas, arī ja tas tiek noņemts un ievietots atkārtoti. Ja filtri ir izņemti, tie ir jānotīra un starp lietošanas reizēm jāuzglabā uzglabāšanai paredzētajā kastītē, kas ir pievienota iepakojumam. Tādā veidā tie var tikt atkārtoti izmantoti pat vairākas reizes 24 stundu laikā pēc pirmās iepakojuma atvēršanas. Filtrus lietošanas laikā var vairākas reizes izņemt un ievietot atkārtoti nepārsniedzot atļauto lietošanas laiku. Lietošanas starplaikos sargāt no spožas gaismas, putekļiem un gaisa plūsmām glabājot tos aizsargātā vietā - uzglabāšanai paredzētajā kastītē.

### BRĪDINĀJUMI / PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

- Nekavējoties noņemiet SANISPIRA® deguna filtrus un pārtrauciet to lietošanu elpošanas grūtību vai elpošanas traucējumu gadījumā, astmas, kā arī deguna gļotādas kairinājuma vai sāpju gadījumā un nelietojiet tos atkārtoti! Ja nepieciešams, meklējiet medicīnisko palīdzību!
- Nelietojiet vienus deguna filtrus starp dažādiem lietotājiem. Tie ir paredzēti individuālai lietošanai tikai vienam lietotājam.
- Deguna filtrus neievietot mutē un nenorīt! Neatdalīt tos vienu no otra.
- Satur mazas daļas- norijot vai nepareizi lietojot ierīci pastāv nosmakšanas riski.
- Glabājiet deguna filtrus bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju!
- Deguna filtri ir domāti pieaugušajiem un personām no 12 gadu vecuma.
- Uzglabāt istabas temperatūrā, tumšā un sausā vietā.
- Pēc lietošanas neizmest vidē, bet utilizēt saskaņā ar vietējās pašvaldības likumiem par atkritumu apsaimniekošanu.



SANISPIRA® deguna filtri ir patentēta medicīnas ierīce, kas ražota ekskluzīvi tikai

HSD Europe Srl, Via Castegnato 19, Rodengo Saiano, 25050 (BS), Itālija

Derīguma termiņu (Exp.date) un partijas numuru (Lot) skatīt uz iepakojuma.

Izplatītājs: SIA Elifarma, Baznīcas iela 18, Rīga, LV-1010, www.sanispira.lv

Lietošanas instrukcijas pēdējais pārskatīšanas datums: 19/03/2020